

Nr.	Kontroll:	Metode:	Krav:
Formontasje			
1a	13088 må lages	Verksted	Skal være lakkert
1b	Utpakking	Manuell	Sjekk for visuelle avvik eller skader.
Sluttmontasje			
2a	Batteri-deksel/sølebeskytter	Sølebeskytter poppes fast. 18cm Kantprofil, 11480, monteres på sølebeskytter for å tette mot batterideksel på begge sider.	Skal sitte fast og tette godt
2b	Batterier	Sett inn, stropp fast	Polsko skal være godt festet. Batteriene skal sitte godt fast 2 stk. Haze 56Ah - 11656
2c	Motorkasse	Bruk kobberpasta på skruene	Skal kunne åpnes selv etter lang tids bruk
2d	Setetapp	Bor 2 nye hull for lavere setehøyde	Samme avstand som mellom de eksisterende hull.
2e	Sete	Monter	
2f	Krykkeholder	Monter dobbel krykkeholder. Består av 2x 12854 og 1x 12399, festes i høyre armlene	Skal sitte godt fast. 8mm hull bores 41mm over eksisterende nedre hull på «fremre krykkeholder». Nedre hull bores opp til 8mm. Festes mellom seterygg og høyre armlene.
2g	Kurv med festebrakett foran	Monteres. Festebrakett festes med 2 stk M5x16 pan skruer. Bruk to stk. 13088 på innsiden av luke. 1cm borrelås festes i øvre hjørner mellom luke og kant på hanskerom. Forhindrer gnissing ved kjøring på ujevnt underlag.	Monteres på luke foran. To 5mm hull bores i senterlinjen av luken. Det øverste 55mm fra toppen og det nederste 40mm under.
2h	Speil	Monter. Bruk kobberpasta på gjenger.	Skal sitte godt fast.
2i	Bremsewire	Justering	Sjekk at strømpe ligger rett hele vegen
2j	Forstilling	Sjekk og eventuelt juster	Spissing skal være rett
2k	Klistremerker og refleks	Klistres på i henhold til spesifikasjoner.	«HEPRO C4» over hovedlykt og over eksisterende merking bak. En orange rund refleks, 11761, klistres i bakkant på forskjerm høyre og venstre side.
Ferdigkontroll			
3a	Funksjonskontroll	Test alle funksjoner	Virker som de skal
3b	Prøvekjør på gulv	Test alle funksjoner	Ingen ulyd, stopplengde 2m, kontroll for kast i hjul
3c	Lader	Prøveladning	Skal indikere ok. Batteriene skal være ladet før levering. Leveres med 12908 - Lader Victron Impulse 24/8 smart.
3d	Leveranse	Sjekk	Plukklista skal stemme med produktet. Husk bruksanvisning
3e	Dekk	Luftrykk	2,5 bar foran og bak
3f	QR kode	Limes på rattstamme	Skal sitte fast
3g	Pakking	Stroppes fast på palle. Bruk pallehette og pappsarg.	Sikret mot transportskade
3h	Kolli-merking	Ordrenummer	Påføres emballasjen
3i	Serienummer	Limes oppå eksisterende serienummer lapp.	Skal sitte fast
Forsendelse - Lager			
4a	EDI merking	Sjekk merking/klistrelapp	Bestillings og serienummer skal stemme