

Gratulerer med din nye Aurora løftestol!



Før stolen tas i bruk:

Før stolen tas i bruk må kontrollboksen kalibreres.

For å gjøre dette må stolens funksjoner kjøres helt ut og inn igjen.

Dette gjøres på følgende måte:

- Kjør løftefunksjonen helt opp.
- Kjør løftefunksjonen helt ned, og kjør ryggen helt tilbake. På synkronstoler kjøres stolen helt opp og helt ned.
- Kjør fotputen helt opp, og helt ned (på standard- og tilt-stoler).
- Tilt stolen, helt tilbake (på tilt-stoler).
- Tilt stolen, helt fram (på tilt-stoler).

Stolen er nå klar til bruk!