

Gratulerer med din nye Aurora løftestol!



Før stolen tas i bruk:

Før stolen tas i bruk må kontrollboksen kalibreres.

For å gjøre dette må stolens funksjoner kjøres helt ut og inn igjen.

Dette gjøres på følgende måte:

- Kjør løftefunksjonen helt opp.
- Kjør løftefunksjonen helt ned, og kjørt ryggen helt tilbake.
På synkronstoler kjøres stolen helt opp og helt ned.
- Kjør fotputen helt opp, og helt ned (på standard- og tilt-stoler).
- Tilt stolen, helt tilbake (på tilt-stoler).
- Tilt stolen, helt fram (på standard- og tilt-stoler).

Se neste side for
tilbehørslisten →

Stolen er nå klar til bruk!

Aurora løftestol - Tilbehør



Nakkepute ekstra stor (isoporkuler)
Stoff eller hud



Nakkepute ekstra stor (vatt)
Stoff eller hud



Nakkepute med dun
Stoff eller hud



Armlenebeskyttelse
Stoff eller hud



Inkontinestrekk sete
Stoff eller hud



Inkontinestrekk sete og rygg
Stoff eller hud



Plansete lite
Hud



Plansete stor
Hud



Setepute med trykkavlastning
Stoff eller hud



Setepute dyp
Stoff eller hud



Supersoft trekk rygg og sete
Stoff eller hud



Ryggtrekk komfort
Stoff eller hud



Ryggtrekk sidestøtte
Stoff eller hud



Korsryggstøtte liten (oppblåsbar)
Stoff eller hud



Korsryggstøtte, stor (oppblåsbar)
Stoff eller hud



Avislomme
Stoff eller hud



Belte hofte
Liten, medium og stor



Forlengersett fotløftsaks



Hjulunderstell
Med sentralbrems



El-rotasjon

For mer informasjon kontakt oss eller besøk hepro.no