



BRUGERVEJLEDNING

# Badetoiletstol Vastus

**Stærk og funktionel badetoiletstol udviklet til den bariatriske bruger.**

Badetoiletstol Vastus er beregnet til brugere, der vejer op til 325 kg.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

# Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhed.....	3
2. Symbolforklaring.....	4
3. Generelt .....	5
4. Anvendelse.....	5
5. Indstilling .....	5
6. Langtidsopbevaring .....	6
7. Rengøring og vedligeholdelse .....	6
8. Bortskaffelse.....	6
9. Garanti.....	7
10. Specifikationer .....	8
11. Bestilling.....	8

# 1. Sikkerhed

---



## ADVARSEL

Badetoiletstol Vastus må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af Badetoiletstol Vastus. Ved forkert anvendelse kan bruger lide skade.

Brugervejledningen skal læses grundigt, før Badetoiletstol Vastus tages i brug. Ret specielt opmærksomheden mod Sikkerhedsvejledninger mærket med

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert anvendelse af Badetoiletstol Vastus.

Kontakt Cobi Rehab med det samme, hvis Badetoiletstol Vastus er beskadiget eller har mangler. Brug aldrig egne erstatningsreservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for skader eller u hensigtsmæssige situationer, der opstår efter reparationer, der er foretaget uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.



## SIKKERHEDSVEJLEDNINGER

Badetoiletstol Vastus må kun indstilles af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i brugen af Badetoiletstol Vastus. Forkert indstilling kan skade brugeren.

Badetoiletstol Vastus kan vælte eller tage skade, hvis den anvendes af en bruger, der vejer over 325kg.

Badetoiletstol Vastus må ikke bruges i bassiner eller swimmingpools.

Brug kun Badetoiletstol Vastus på hårdt underlag med en maksimal hældning på 3°, da Vastus ellers kan vælte.




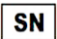





Badetoiletstol Vastus skal monteres korrekt inden brug. Se under **Indstilling**.

Desinficer altid Badetoiletstol Vastus, inden den overgår til ny bruger. Det skal ske for at undgå krydskontamination.

Manglende kontrol af bolte, som anvist kan forårsage funktionsfejl.

Mangel på vedligeholdelse kan skade Badetoiletstol Vastus, forkorte holdbarheden eller have indvirkning på eller påvirke Badetoiletstol Vastus ydeevne.

## 2. Symbolforklaring

Følgende symboler findes i brugervejledningen eller på produktets label.	
	Advarsel!
	Overensstemmelseserklæring ifølge Direktivet for medicinsk udstyr, EU 2017/745
	Cobi varenummer
	Serienummer
	Produktionsår
	Fabrikant
	Medicinsk udstyr, klasse 1
	Brugervægt
	Læs manual
CE-Label er placeret på Badetoiletstolens ramme. Eksempel på label kan ses herunder.	



## 3. Generelt

---

Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om målgruppen for og anvendelsen af Badetoiletstol Vastus. Brugervejledningen indeholder også en specifikationsliste.

Den nyeste version af denne brugervejledning finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er den nyeste.

Hvis du har brug for en brugervejledning, som er skrevet med en større skriftstørrelse, findes brugervejledningen i PDF-form på [cobirehab.com](https://www.cobirehab.com), som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på telefon 7025 2522, hvis du ønsker flere oplysninger om Badetoiletstol Vastus.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.


Badetoiletstolens UDI-nummer fremgår af labelen på badetoiletstolen.

Produktsikkerhedsmeddelelser og tilbagekaldelse af produkter kan ses på hjemmesiden under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/vigtig-produktinformation/>


## 4. Anvendelse

---

Badetoiletstol Vastus bruges til toiletbesøg og til badesituationer i vådrumsmiljøer (fx bruserum).

 Badetoiletstol Vastus kan vælte eller tage skade, hvis den anvendes af brugere over 325 kg.

Badetoiletstol Vastus bruges på hospitaler, i plejeboliger, i eget hjem og på institutioner.

 Badetoiletstol Vastus må ikke anvendes saltholdigt miljø (svømmebassin eller svømmehal) eller i stærkt syreholdige eller basiske miljøer.

Konsulter altid en terapeut før Badetoiletstol Vastus anvises til en bruger.

### Kontraindikationer

Der er ingen kontraindikationer forbundet med brugen af Badetoiletstol Vastus.

## 5. Indstilling

---

### Montering af Badetoiletstol Vastus

Vastus består af to dele, stolens ramme og ryglæn.

1. Sæt en skive på hver bolt. Fastgør ryglænet til stolens ramme ved at indsætte de fire bolte og skiver i huller, to på hver side. Stram dem godt med den medfølgende sekskantet unbrakonøgle.

### Justering af sædedybde og ryglæn

1. Sædedybden kan justeres i tre positioner. Vælg to huller (forreste, midterste eller bageste) på ryglænet for den ønskede sædedybde. Se instruktionerne ovenfor.

### Justering af benenes højdeindstillinger

1. Højden på benene kan justeres i seks positioner ved at løsne og stramme de fire bolte, der allerede er monteret på benene. Brug begge sekskantnøgler, når du justerer.

### Værktøjer til brug

To unbrakonøgler med 5 mm sekskant, fire skruer med indvendig sekskant og fire skiver.

### Under brug

Sæderyggen kan indstilles i tre forskellige dybder. Justering af sædedybden påvirker ikke stolens stabilitet.

## 6. Langtidsopbevaring


---

Badetoiletstol Vastus bør opbevares mørkt og i temperaturer mellem -10° - 50°C.

## 7. Rengøring og vedligeholdelse


---


Badetoiletstolens stel, sæde og armlæn skal efter brug vaskes i kalk- og saltneutralt vand med et almindeligt rengøringsmiddel og efterfølgende tørres af.

 Badetoiletstol Vastus må ikke anvendes saltholdigt miljø (svømmebassin eller svømmehal) eller i stærkt syreholdige eller basiske miljøer.

Sædet kan fjernes og desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt min. 1000 ppm og max. 10000 ppm.

Eventuelle lokale procedurer omkring rengøring og vedligeholdelse skal altid overholdes.

 Manglende overholdelse af eftersyn af fx bolte kan medføre fejlfunktion.

 Desinficer altid Badetoiletstol med drivhjul, inden den overgår til ny bruger. Det skal ske for at undgå krydskontamination.

## 8. Bortskaffelse

---

Når Badetoiletstol Vastus ikke længere er i brug, skal den bortskaffes på miljøforsvarlig vis.

Kontakt Cobi Rehab eller kommunen for yderligere information om bortskaffelse.

## 9. Garanti

---

Cobi Rehab garanterer, at Badetoiletstol Vastus er fejlfri, når den leveres. Skulle der mod forventning være mangler eller skade på Badetoiletstol Vastus ved modtagelsen, så kontakt Cobi Rehab med det samme.

Garantiperioden for Badetoiletstol Vastus er et år fra købsdato og dækker produktionsfejl eller defekter ved levering. Fakturaen gælder som garantibevis.

Garantien gælder ikke:

- produkter, hvor serienummer, batchnummer eller lignende er blevet fjernet eller beskadiget væsentligt.

- produkter, hvor der er foretaget reparation af uautoriseret personale.

### 9.1 Utilsigtet hændelse

Enhver hændelse, der er indtruffet i forbindelse med brugen af Badetoiletstol Vastus, skal indberettes til Cobi Rehab.

### 9.2 Efter forventet levetid

Efter den forventede levetid er det vigtigt, at der foretages en samlet vurdering af produktet, inden fortsat brug.

Efter den forventede levetid kan Cobi Rehab ikke garantere egnethed og sikkerhed for produktet, da Cobi Rehab ikke har kontrol over, hvordan produktet er brugt og slidt.

Den samlede vurdering af produktet skal udføres af kvalificeret fagpersonel, og som et minimum

Garantien omfatter ikke:  
- sliddele.

Garantien gælder ikke, hvis Cobi Rehab vurderer, at Badetoiletstol Vastus er blevet håndteret på en u hensigtsmæssig måde.

Ved skade på grund af forkert brug, faktureres både service og anvendte reservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for skader af nogen af art.

⚠ Mangel på vedligeholdelse eller brug i saltholdige, syreholdige eller basiske miljøer kan skade Badetoiletstol Vastus, forkorte holdbarheden eller have indvirkning på eller påvirke Badetoiletstol Vastus ydeevne.

skal der tages højde for, hvordan produktet er blevet brugt, produktets tilstand og dets komponenter.

Cobi Rehab kan altid foretage en sådan vurdering.

## 10. Specifikationer

Brugervægt maks.	325 kg
Sædebredde	61/71 cm
Sædedybde justerbar	40-52 cm
Sædehøjde justerbar	44-59 cm
Afstand mellem armlæn	65/75
Totalbredde over armlæn	73/83 cm
Totalhøjde	79-94 cm
Totallængde (fra fod til rygbøjlen)	80-101 cm
Bredde toiletåbning	Ø 24 cm, 35 cm lang
Sæde/ryg/armlæn	Polyuretan
Ramme	Krom molybdæn stål/SAE41-30
Vægt (61 cm/71 cm)	14/15 kg
ISO - klassifikation	09 33 07 03
Produktets forventede levetid	7 år
Risikoklasse	I
UDI-DI	5740000101288/5740000101295
Grundlæggende UDI	5740000100003MY
Generelle krav og prøvningsmetoder	EN 12182
Overfladetemperaturen på Vastus kan stige eller falde, hvis den udsættes for eksterne kulde og varme påvirkninger.	

## 11. Bestilling

Model	HMI-nummer	Varenummer
Bariatrisk Badetoiletstol Vastus, 61 cm	52000	0142-061-000
Bariatrisk Badetoiletstol Vastus, 71 cm	52001	0142-071-000





# COBI REHAB

---



**FABRIKANT OG FORHANDLER**

**Cobi Rehab**  
Silovej 16-18  
DK-2690 Karlslunde  
Danmark  
+45 7025 2522  
[cobirehab.com](http://cobirehab.com)