



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

PRODUKTARK

Bariatrisk stok

Stærk og funktionel stok udviklet til den bariatriske bruger.

Bariatrisk stok er beregnet til brugere op til 270 kg.



- Højdejusterbar
- Designet af Cobi Rehab
- Stærk rørkonstruktion
- Vægtkapacitet op til 270 kg



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Bariatrisk stok

Anvendelse og konstruktion

Bariatrisk stok er en ekstra forstærket stok af stål, specielt udviklet til at yde støtte og sikkerhed under gang for brugere op til 270 kg. Den bruges på hospitaler, i plejeboliger og i private hjem. Bariatrisk stok kan bruge indendørs og udendørs.

Stokkens buede rør placerer brugerens vægt direkte over akslen. Stokken har fast greb, refleks og håndledsstrop.

Rengøring og vedligeholdelse

Bariatrisk stok rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Kontroller de to udløserknapper regelmæssigt og udskift dem hvis nødvendigt. Manglende kontrol af de to udløserknapper, som anvist, kan forårsage funktionsfejl.

Indstilling

Bariatrisk stok er udstyret med to udløserknapper på stokkens skaft til højdeindstilling.

Før brug skal højden på Bariatrisk stok justeres ved at trykke på de to udløserknapper.

⚠ Bariatrisk stok må ikke bruges, før de to udløserknapper til højdeindstilling er trykket helt på plads.

Desinficering

Bariatrisk stok kan også desinficeres med fx Wet Wipe 70% eller et klorprodukt 1000-1200 ppm.

⚠ Desinficer altid Bariatrisk stok, inden den overgår til ny bruger. Det sker for at undgå krydskontamination.

Specifikationer	
Brugervægt max.	270 kg
Højdejusterbar	71-93 cm
Vægt	0,9 kg
Refleks	Ja
Materiale	Krom molybdæn stål/SAE41-30
Greb	TPR - Termoplastisk gummi
ISO - klassifikation	ISO 12 03 03 - 05
Produktets forventede levetid	7 år
Risikoklasse	I
Grundlæggende UDI	5740000100010MV
UDI-DI	5740000102810
Brugervejledning og produktark findes på website og kan skaleres op til stor skriftstørrelse ved synshandicap.	

Model	Varenummer	HMI
Bariatrisk stok	0200-000-000	36492