



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

PRODUKTARK

Bariatrisk Albuestok

Stærk og funktionel albuestok udviklet til den bariatriske bruger.

Albuestok er beregnet til brugere, der vejer op til 325 kg. Den bruges på hospitaler, i plejeboliger og i private hjem. Bariatrisk Albuestok kan bruge indendørs og udendørs.



- Højdejusterbar
- Designet af Cobi Rehab
- Anatomisk håndgreb
- Stærk rørkonstruktion
- Vægtkapacitet op til 325 kg
- Tre modeller: universal, højre og venstre model



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Bariatrisk Albuestok

Anvendelse og konstruktion

Bariatrisk Albuestok er en forstærket stok af stål, specielt udviklet til at yde støtte og sikkerhed under gang for brugere op til 325 kg.

Albuestok har en bred underarmsstøtte og leveres med universal eller anatomiske håndgreb med indbygget refleks. Albuestok har en 25 mm stærk rørkonstruktion og kan højdereguleres via clipssystem med gennemgående stålpind.

Rengøring og vedligeholdelse

Bariatrisk Albuestok rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel eller desinficeres med et klorprodukt 1000-1200 ppm.

Desinficer altid Bariatrisk Albuestok ved overgang til ny bruger. Derved undgås krydskontamination.

Indstilling

Albuestok højdeindstilles ved at fjerne clipsen og sætte stokkebenets inderrør i ønsket position, stikke clipsens pind gennem hullerne og derefter trykke clipsen på plads.

Albuestok må ikke bruges, før clipsen til højdeindstilling er trykket helt på plads.

Clips og den gennemgående pind skal kontrolleres regelmæssigt og udskiftes ved behov. Manglende kontrol af clips, som anvist kan forårsage funktionsfejl.

Specifikationer	
Brugervægt max.	325 kg
Højdejusterbar	68-110 cm
Vægt	1,5 kg
Refleks	Ja
Underarmsstøtte	15 cm
Håndgreb	14 cm
Materiale	Krom molybdæn stål/SAE41-30
Greb	Nylon med fibre
ISO - klassifikation	ISO 12 03 06 - 04
Produktets forventede levetid	7 år
Risikoklasse	I
Grundlæggende UDI	5740000100010MV
UDI-DI	5740000102889, 5740000102896, 5740000102902
Brugervejledning og produktark findes på website og kan skaleres op til stor skriftstørrelse ved synshandicap.	

Model	HMI-nummer	Varenummer
Albuestok med universal håndgreb	51996	0205-000-000C
Albuestok med anatomisk håndgreb højre	83607	0205-000-000RC
Albuestok med anatomisk håndgreb venstre	83609	0205-000-000LC