



COBI REHAB[®]
The Positioning Company

PRODUKTARK

Eclipse Tilt – bariatrisk kørestol

Manuel kørestol i tidløst design beregnet til brugere op til 270 kg. Udstyret med tiltfunktion, som sikrer individuel optimal komfort og positionering. Mulighed for indstilling af højde og sædedybde.

Eclipse Tilt Kørestol bruges på plejecentre og i private hjem til brugere med behov for en komfort kørestol med trykaflastende sæde.



- Bruges i rehabiliteringen af den mobile bruger.
- Mulighed for justering af sædedybde og hældning samt ryglænets vinkel.
- Forlængede armlæn (tilkøb), der gør det lettere at komme ind og ud af kørestolen.
- Desinficerbar.
- Passer til de fleste døråbninger.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Anvendelse

Eclipse Tilt Kørestol er designet til indendørs brug på fx hospitaler, institutioner og i plejeboliger.

Kørestolen kan også bruges i private hjem og udendørs.

Eclipse Tilt Kørestol er beregnet til brugere op til 270 kg, der har begrænset stand- og gangfunktion.

Eclipse Tilt Kørestol er udstyret med en tiltfunktion op til 30°, som sikrer optimal komfort, støtte og positionering af bruger.

Den tilsigtede operatør af Eclipse Tilt Kørestol er en sundhedsuddannet fagperson, fx en terapeut, sygeplejerske eller andet plejepersonale.

Tilsigtede operatør kan også være en bruger med truncusstabilitet og funktionsevne til selv at kunne drive, styre og bremse kørestolen.

Om dette produktark

Dette produktark indeholder vigtige oplysninger om anvendelsen af Eclipse Tilt Kørestol og målgruppen for kørestolen. Det indeholder også en lang række specifikationer på Eclipse Tilt Kørestol.

Den nyeste version af dette produktark finder du på vores website. Tjek om den version, du sidder med nu, er det nyeste.

Hvis du har brug for et produktark, som er skrevet med en større skriftstørrelse, findes det i PDF-form på cobirehab.com, som kan skaleres op i skriftstørrelsen.

Eclipse Tilt Kørestol kan bruges i omgivelser med en temperatur fra 0-40°C og i en luftfugtighed mellem 20-75%.

Ibrugtagning

Når Eclipse Tilt Kørestol tages i brug, bør bruger sammen med terapeut eller en anden sundhedsfaglig medarbejder udføre en række forskellige række-, fremadbøjnings- og forflytningsøvelser for at forstå sikkerhedsgrænserne for kørestolen.

Kontraindikationer

Brugere med nedsat kognitive funktionsevner skal overvåges og guides i forbindelse med brugen af Eclipse Tilt Kørestol.

Eclipse Tilt Kørestol er ikke egnet til den udadreagerende bruger.

Du kan altid kontakte Cobi Rehab på 7025 2522 eller på cobi@cobi.dk, hvis du ønsker flere oplysninger om Eclipse Tilt Kørestol.

Cobi Rehab forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne uden forudgående varsel.

Konstruktion

Eclipse Tilt Kørestol er en manuel fastramme kørestol opbygget af en stærk stålramme, som giver maksimal styrke, stivhed og lang holdbarhed. Den er designet, så størstedelen af brugers vægt hviler på drivhjulene.

Forhjulene er placeret foran sædebunden for at hindre, at kørestolen vælter fremover.

Dækkene er massive, hvilket gør fremdrift og styring let.

Eclipse Tilt Kørestol er udstyret med anti-tip støtter bag til, så bruger kan stige ind og ud af kørestolen uden risiko for at vælte. Sædepladen er massiv og giver bruger et godt afsæt fra kørestolen.

Eclipse Tilt Kørestol er udstyret med en tiltfunktion op til 30°, som sikrer optimal komfort, støtte og positionering af bruger. Eclipse Tilt Kørestol kan uden problemer tilte brugere op til 270 kg.

Tiltning af Eclipse Tilt Kørestol foregår ved hjælp af tilt grebet på siden af skubbehåndtaget.

Eclipse Tilt Kørestol kan monteres med forskellige rygsystemer, som tilgodeser de forskellige kropsformers behov. Stropryggen er konstrueret, så brugere med en voluminøs bagdel får god lændestøtte.

Eclipse Tilt Kørestol har justerbar sædedybde, sædehøjde og sædevinkel, hvilket giver store tilpasningsmuligheder for den enkelte bruger.

Eclipse Tilt Kørestol leveres som standard uden fodstøtter, men swing-away fodstøtter eller elevérbare fodstøtter med lægpuder kan tilkøbes.

Eclipse Tilt Kørestol kan udstyres med forlængede armlæn, som gør det nemmere for den selvhjulpne bruger at sætte og rejse sig fra stolen.

Armlæne kan forstærkes yderligere.

Eclipse Tilt Kørestol leveres uden sædepude, men Cobi Rehab forhandler forskellige typer sædepuder.



Elevérbare fodstøtter (tilkøb)



Eclipse Tilt tiltet.



Eclipse Tilt med forlængede armlæn (tilkøb).



Fodstøtter vinklet ud.

Justeringsmuligheder

Justering af rygramme

Justér sædedybden og rygvinklen, så de passer til sædets ønskede højde og hældning.

Cobi Rehab eller anden forhandler kan tilpasse højden af rygrammen ved at forkorte rørene til ønsket længde med en nedstryger eller rørskærer.

Justering af polstring

Stropperne på bagsiden af rygpolstringen kan justeres ved enten at løsne eller stramme dem.

Justering af armlænenes højde

Armlænets højde kan justeres ved hjælp af en udløserknop på forsiden af armlænet.

Justering af drivhjulsakslens position

Drivhjulets placering kan justeres fremad eller bagud.

Justering af ryglænets vinkel

Vinklen mellem sæde og ryglæn kan indstilles i en vinkel på 90°-122°.

Justering af sædehøjde i forhold til gulv

Eclipse Tilt Kørestolens sædehøjde kan justeres i forhold til gulvet fra 16" til 18".

Rengøring

Eclipse Tilt Kørestolens stel, sæde, skubbehåndtag og ryglæn skal rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Kørestolspuden kan skiftes ved overgang til ny bruger.

Desinficering

Kørestolens stel, sæde, armlæn og ryglæn kan også desinficeres med fx ethanol 70 % eller et klorprodukt 1000-1200 ppm.

Opbevaring og transport

Når Eclipse Tilt Kørestol ikke er i brug, bør den opbevares tørt og i en temperatur mellem -10° - 50°C.

Ved langtidsopbevaring gælder samme temperatur. Eclipse Tilt Kørestol bør desuden opbevares mørkt og dækket af et tæppe eller lignende.

Transport

Eclipse Tilt Kørestol er (uden bruger) egnet til landtransport. Eclipse Tilt Kørestol kan ikke klappes sammen, da den har en fast ramme.

Kørestolen tåler at blive løftet op i rammen, hvis den skal transporteres uden bruger i et køretøj.

Specifikationer

Maks. brugervægt	270 kg
Risikoklasse	I
Grundlæggende UDI DI	13829
Forventet holdbarhed	Minimum 7 år
Crash testet	Nej
Sædedybde	410 - 560 mm
Sædebredde	550 - 820 mm
Sædehøjde	410 - 510 mm
Stropryg	Polypropylene
Rygvinkel	90° - 122°
Totallængde med benstøtter	870 mm
Totalbredde	Sædebredde + 250 mm
Vægt kørestol	40 kg
Hældning ned ad bakke	Maks. 10°
Hældning op ad bakke	Maks. 10°
Hældning sideværts	Maks. 10°
Drivhjul	24" (580 mm x 30 mm) massive PU dæk
Forhjul	125 mm nylon med PU
Stelmateriale	Stål
Skubbebøjle, indstillige	Ja
Hjulgafler	HD stålgaffel
Fodstøtterør	6061-T6 Aluminium
Fodplade	6061-T6 Aluminium/nylon med glasfiber
Sammenklappelig	Nej
Risikovurdering	EN/ISO 14971: 2012
Generelle krav og prøvningsmetoder	ISO 7176-1, -3, -5, -7, -8, -16 og -19

Bestilling og tilbehør

Model/Sædebredde/Sædedybde	Varenummer
Eclipse Tilt ekskl. fodstøtter/55 cm/ 41-56 cm	0121-055-000
Eclipse Tilt ekskl. fodstøtter/61 cm/ 41-56 cm	0121-061-000
Eclipse Tilt ekskl. fodstøtter/66 cm/ 41-56 cm	0121-066-000
Eclipse Tilt ekskl. fodstøtter/72 cm/ 41-56 cm	0121-072-000
Eclipse Tilt ekskl. fodstøtter/82 cm/ 41-56 cm	0121-082-000
Tilbehør	0121-050-000
Iltflaskeholder Ø10 cm	0120-999-021
IV holder (dropstativ)	0120-999-020
Nakkestøtte	0120-999-103
Bord universal (til sædebredde 55-72 cm)	0100-999-001
Ryglænsforlængelse	0120-999-033
Armlæn forlænger højre	0120-999-078
Armlæn forlænger venstre	0120-999-077
Fodstøtte standard swing-away højre	0120-999-008
Fodstøtte standard swing-away højre	0120-999-009
Fodstøtter elevérbar højre	0120-999-006
Fodstøtter elevérbar venstre	0120-999-007
Beslag til biltransport (Transit Tie-Down System)	0120-999-065
For reservedele kontakt Cobi Rehab på tlf. 7025 2522 eller cobi@cobi.dk	



COBI REHAB[®]

The Positioning Company

FORHANDLER

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522
cobirehab.com



FABRIKANT

PDG Mobility
PDG Product Design Group Inc.
#103-318 East Kent Avenue South,
Vancouver
BC V5X 4N6
Tel.: (604) 323-9220
Fax: (604) 323-9097
E-mail: info@pdgmobility.com
www.pdgmobility.com