

# Badestol Plus

Bruksanvisning



CE

HEPRO

# Innholdsfortegnelse

3-4	Light Pediatrisk Badestol
	Bruksområde
	Innhold i pakken
	Resirkulering
	Produktdimensjoner
	Garanti-erklæring
5	Vedlikehold
5-6	Justeringer
	Justere ryggstøtten (Badestol Standard)
	Justere ryggstøtten (Badestol Plus / Light)
	Justere setet (Light)
	Juster leggstøtten (Standard / Plus)
	Justere badestolens bakben
	Justere bakben og forben på badestol
6	Sammenfolding av badestol
6	Hvordan ta av setetrekket
7-8	Understell / Understell med hjul
	Montering av understell
	Sammenfolding av understell
	Festing av badestol til understell
	Understell med hjul
	Rengjøring
9	Tilbehør
9-10	Montering av tilbehør på badestol
	Hodestøtte
	Brystbelte
	Fast hoftebelte ( M/L )
	Lårbånd
	Leggbånd
10	Rengjøring
11	Symbolforklaring

# Light Pediatrisk Badestol

Modell: Badestol Standard, Badestol Plus, Badestol Light, BCL004-serien, LTS-serien, LSS-serien



Badestol Standard



Badestol Plus



Badestol Light



Viktig

Versjon: C/1

Utgivelsesdato: 19.06.2025

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon for sikker bruk og vedlikehold av badestolen. Vennligst ta deg tid til å lese denne brukerveiledningen før du bruker dette produktet. Det er svært viktig å følge instruksjonene. Hvis produktet ikke brukes i henhold til instruksjonene, kan det i verste fall føre til alvorlig skade eller dødsfall for brukeren.

## Bruksområde

Light er en badestol som gir støtte til barn og unge voksne i bad- eller dusjsituasjon. Badestolen er beregnet for innendørs bruk i baderom.

## Innhold i pakken

Badestolen kommer ferdig montert. Du trenger kun å justere ryggstøtten, leggstøtten og bena på badestolen før bruk. Vennligst sjekk at du har fått alle tilbehørene du har bestilt.

## Resirkulering

Når produktet har nådd slutten av sin levetid, bør det skilles etter materialtype slik at delene kan resirkuleres og kastes på en sikker måte.



NON  
STERILE

# Bruksanvisning

## Produktdimensjoner

Modell	Standard / Plus			Light		
	S	M	L	S	M	L
Størrelse	S	M	L	S	M	L
Setedybde	28 cm	35 cm	40 cm	42 cm	42 cm	42 cm
Setebredde	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm
Ryggstøttehøyde	49 cm	60 cm	71.5 cm	49 cm	70 cm	71.5 cm
Leggstøttelengde	25 cm	29.5 cm	34cm	/	/	/
Totallengde	100 cm	123 cm	143 cm	100 cm	123 cm	143cm
Totalbredde	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Sittehøyde over gulv	15-40 cm	15-46 cm	16-51 cm	15-40 cm	15-46 cm	16-51 cm
Maksimal belastning	73 kg	73 kg	73 kg	73 kg	73 kg	73 kg

## Garantierklæring

Produsentens garantiperiode er 3 år, regnet fra kjøpsdato som angitt på kvitteringen. Garantien dekker ikke feil forårsaket av feilaktig bruk eller uaktsomhet fra eierens side. Garantien gjelder heller ikke forbruksdeler som gummideler, overtrekk og annet valgfritt tilbehør, da disse opplever normal slitasje og må skiftes periodisk.




### Advarsel

- Kun kvalifiserte fagpersoner skal vurdere utstyrent egnethet og sikkerhet for hver enkelt bruker.
- Småbarn og spedbarn kan drukne under bad. Utvis ekstra forsiktighet ved bruk av badestolen i badekar.
- ALDRI forlat brukeren uten tilsyn, selv i kort tid. Omsorgsperson må alltid ha fysisk kontakt med brukeren.
- ALDRI la brukeren reise seg opp i badestolen.
- IKKE plasser badestolen på ujevnt underlag eller skrå flater.
- For å unngå brannfare: Hold badestolen minst 1 meter fra åpne varmekilder (sigaretter, elektriske apparater, åpen ild).
- For å unngå skader: Hold brukeren på avstand under oppsetting og sammenfolding av produktet.
- Brystbelte kan føre til kvelning. Alt tilbehør må tilpasses brukerens kropp for optimal komfort og sikkerhet.
- Belter og bånd MÅ brukes til enhver tid under bruk for å forhindre fall eller utglidning fra badestolen.
- Overbelastning, feil sammenlegging eller bruk av ugodkjent tilbehør kan føre til skade på produktet. Maks vektgrense for alle størrelser: 73 kg (160 lbs).
- Kontroller badestolen regelmessig for skader eller slitasjetegn. IKKE bruk badestolen ved synlige skader, slitasje eller manglende deler. Ødelagte deler må skiftes umiddelbart.

## Vedlikehold

Produktet skal rutinemessig kontrolleres, vedlikeholdes og rengjøres. Avbryt bruken ved skader, slitasje eller manglende deler på produktet. Kontakt leverandør for å få utført en autorisert reparasjon eller erstatning. Reparasjoner eller modifikasjoner utført av uautorisert personel er forbudt. Dersom kunden gjennomfører eller bestiller modifikasjoner/reparasjoner uten produsentens skriftlige godkjenning, opphører garantien.


## Justeringer

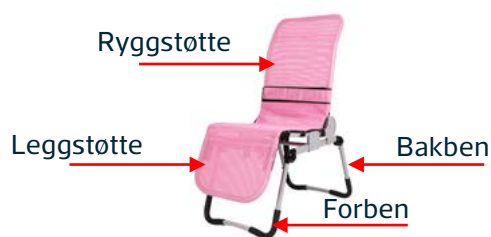

### Advarsel

- ALDRI la brukeren leke med dette produktet.
- For å unngå klemskade av fingre eller lemmer: Vær forsiktig når du justerer badestolen.
- Kontroller at alle låsemekanismer er korrekt innstilt og i lås før bruk.
- Still inn badestolen til en komfortabel posisjon før bruker plasseres i stolen. Ved ubehag tas brukeren forsiktig ut av stolen slik at justeringer kan gjøres.
- Justering av produktet MÅ IKKE gjøres mens bruker sitter i stolen – unntatt vinkeljustering av leggstøtten.

### Justere ryggstøtten (Badestol Standard)

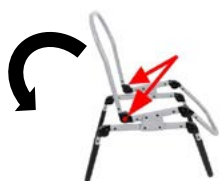

Trykk og hold begge knappene samtidig.



Roter ryggstøtten til ønsket posisjon. Slipp knappene når de klikker på plass.

### Justere ryggstøtten (Badestol Plus / Light)



Løft D-løkken på baksiden av ryggstøtten for å endre vinkelen.



Stopp når ryggstøtten er i ønsket posisjon. Kontroller at staget er festet i hullet mellom sete og ryggstøtte.

### Justere setet (Light)



Løft D-løkken på setets underside. Endre sete-vinkelen ved å løfte eller senke seteplaten.



Slutt å trekke i D-løkken når setet er i ønsket vinkel, og kontroller at staget er festet i hullet i forbindelsesdelen mellom ryggstøtten og setet.

### Juster leggstøtten (Standard / Plus)



Trykk og hold begge knappene samtidig.



Roter leggstøtten til ønsket posisjon. Slipp begge knappene til de klikker på plass.

# Bruksanvisning

## Justere badestolens bakben

Trykk og hold begge knappene samtidig.



"Klikker"



Roter bakbenet til ønsket posisjon. Slipp begge knappene til de klikker på plass.


## Justere bakben og forben på badestol

Trykk og hold begge knappene samtidig.



Trykk og hold begge knappene samtidig.

"Klikker" "Klikker"

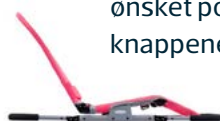


Roter både bakben og forben til ønsket posisjon. Slipp begge knappene til de klikker på plass.



Advarsel

RISIKO for velt: Når bak- og forben stilles til eller under 90°, øker faren for at stol velter.

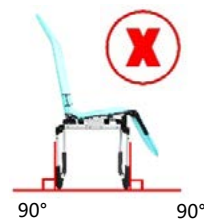

## Sammenfolding av badestol



## Hvordan ta av setetrekket



## Understell / Understell med hjul



Understell


Produktdimensjoner	Liten	Medium	Stor
Lengde	104.5 cm	108 cm	110 cm
Bredde	49.8 cm	49.8 cm	49.8 cm
Høyde	35.5 cm	35.5 cm	35.5 cm



Understell med hjul

Produktdimensjoner	Liten	Medium	Stor
Lengde	112 cm	115 cm	117.5 cm
Bredde	49.8 cm	49.8 cm	49.8 cm
Høyde	43 cm	43 cm	43 cm

## Montering av understell

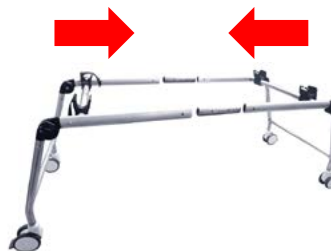


Trykk og hold inne knappen på den tynne røret, og fest den deretter inn i det tykke røret til knappen smeller ut gjennom hullet. Kontroller at stativet er låst fast og stabilt før bruk.



### Advarsel

VELTFARE: Ved benvinkler på eller under 90° øker veltrisikoen kritisk.

Maks. belastning: 90 kg

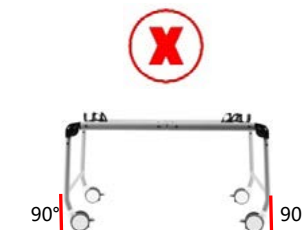

## Sammenfolding av understell



# Bruksanvisning

## Festing av badestol til understell



①



②



③



④



### Advarsel

- Dusjstivet brukes KUN med tiltenkt badestol.
- Stivet er UTELUKKENDE beregnet for bading.
- KONTROLLER at badestolen er stabilt sikret på stivet FØR det tas i bruk.
- Løft ALDRI stivet med bruker i badestolen.
- INSIPISER stivet regelmessig for skader. AVBRYT BRUKEN ved skader/manglende deler.
- Reparer ødelagte deler umiddelbart.

## Understell med hjul



### Advarsel


ALLE hjul MÅ låses ved inn- og utløfting av bruker.



## Rengjøring

Overflaten på understellet rengjøres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel.

### Tilbehør

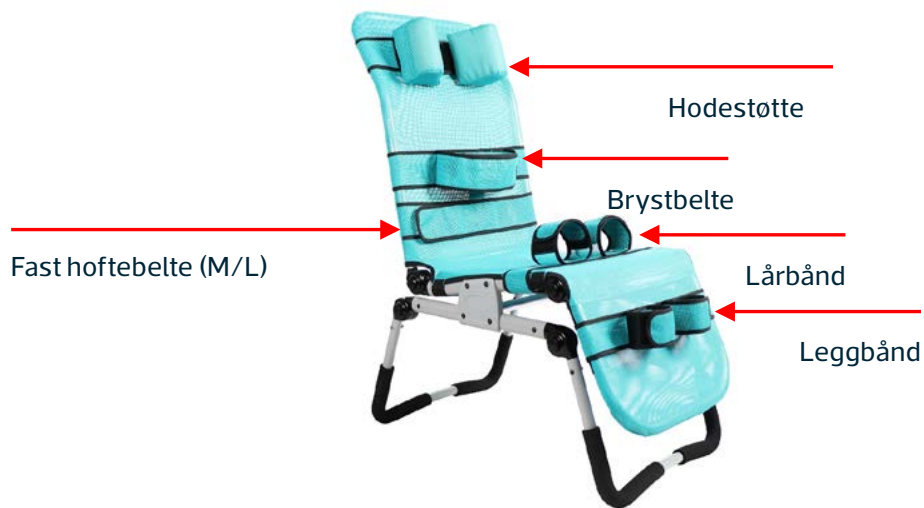

### Advarsel

ALLE tilbehør er IKKE beregnet brukt som støtte sammenhengende over lengre tid.  
 Tilpass tilbehøret nøye for brukerens sikkerhet og komfort.  
 Fest ALDRI brystbelte eller hoftebelte rundt brukerens hals.

### Montering av tilbehør på badestol

#### Hodestøtte



#### Brystbelte



#### Fast hoftebelte ( M/L )



#### Lårbånd



# Bruksanvisning

## Leggbånd



## Rengjøring

- Badestolens ramme: Tørk av med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel.
- Setetrekk:  
Avtakbart og maskinvaskbart  
Vask ved 40°C med mildt vaskemiddel  
Bruk vaskepose for å verne mot skader  
Tørk i tørketrommel på lav varme eller lufttørk  
Tåler IKKE: Klorbleking/stryking/kjemisk rens
- Tilbehør:  
Finvask ved 30°C med mildt vaskemiddel  
Lufttørkes, bør være helt tørt før montering  
Tåler IKKE bruk av: Tørketrommel/kjemisk rens/bleking

## Tips til vedlikehold

### ETTER BRUK:

- Skyll badestolen med rent vann for å fjerne såperester eller andre badeprodukt-rester.
- La badestolen tørke fullstendig før den eventuelt sammenfoldes for oppbevaring, for å forebygge muggdannelse.
- Oppbevar badestolen og tilbehør på et relativt tørt sted for å forebygge muggdannelser.
- Langvarig eksponering for direkte sollys kan forårsake fargeforandring på materialer.

## Symbolforklaring

	CE-merke		Vær forsiktig		Ikke bruk blekemiddel
	Medisinsk utstyr		Produsent		Ikke stryk
	Les bruksanvisningen før bruk		Kun til innendørs bruk	40°C	Maskinvask ved 40°C
	ENKELTPASIENT - FLERBRUK		Autorisert representant i det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS)	NON STERILE	IKKE-STERIL



PRODUSENT: DongGuan LeYuan Plastic & Metal Technology Co.,LTD  
 Adresse: 2nd Baoyuan Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, Kina  
 Tel: +86-0769 8213 1662



Autorisert EØS-representant: SUNGO EUROPE B.V.  
 Adresse: Fascinatioboulevard 522, Enhet 1.7, 2909 VA Capelle aan den IJssel, Nederland  
 Telefon: +3110 303 4500 / +3120 2111106

# HEPRO

Aktiv og trygg  
i alle livets faser