

# Bruksanvisning

  
**HEPRO**  
-easy life

Stoler med oppreisningsfunksjon  
Arctic – Arctic Maxi – Arctic Mini



**NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk!**

Arctic løftestoler er testet og godkjent i henhold til følgende krav og standarder:

EN 12182

EN 13751

EN 1728

EN 60601-1

EN 60601-1-2

MDD 93/42/EEC

EN 1021-1

EN 1021-2

EN 1022

EN 597-1

EN ISO 14971



---

HEPRO AS • Tlf. +47 02366• [www.hepro.no](http://www.hepro.no)

Stoler med oppreisningsfunksjon  
Arctic – Arctic Maxi – Arctic Mini

## Bruksområder

**Arctic** løftestol er beregnet til personer som kan ha vanskelig for å sette seg i eller komme seg opp av en vanlig stol. Den er komfortabel og har mange reguleringsmuligheter, slik at den vil passe til de fleste. Ryggen er to-delt med vinkel- og høyderegulering av øvre del. Brukervekt kan være opp til 165 kg. Bredder i setet kan reguleres mellom 50 og 60 cm

**Arctic Maxi** har samme bruksområde, men er beregnet til brukere som er noe tyngre. Brukervekten er opp til 260 kg. Bredder i setet er 60 cm. Ryggen er hel, men vinkelen på øvre del kan reguleres.

**Arctic Mini** er vår minste løftestol. Den har samme bruksområde som de øvrige, men er beregnet til mindre personer, selv om brukervekten er opp til 150 kg. Setebredder er bare 40 cm. Setet er kortere sammenliknet med de andre Arctic modellene. Arctic Mini har hel rygg uten vinkelregulering av øvre del.

Alle 3 modellene kan leveres med tilt-mekanisme, noe som muliggjør regulering slik at leggene kommer høyere enn hjertet i hvilestilling og dermed gir god drenering mot hjertet.

## Montering av rygg – Alle modeller

Plaser venstre metallhylse **A** over den lange tappen **B**, som vist på bildet. Plaser så den høyre hylsen **D** over den korte tappen **C**. Press deretter ryggen helt ned på tappene slik at de bunner mot rammen.



Stoler med oppreisningsfunksjon  
Arctic – Arctic Maxi – Arctic Mini

## Regulering av sittehøyde


For å oppnå best mulige sittekomfort er det **nødvendig** at sittehøyden reguleres slik at den passer til brukeren. Dette gjøres slik:

- Vipp stolen forover slik at den hviler på benstøtten og forkant av armlene.
- Søylen løses ved å åpne skruene **D**
- Trekk så ut den fjærbelastede bolten **E**
- Sokkelen kan nå flyttes til ønsket posisjon.
- Slipp fjærbolten slik at den kommer på plass i nærmeste hull og lås søylen med skruene. Stram godt til.
- Arctic Maxi har skruene på motsatt side.

**NB!** Påse at utløserwiren ikke blir for stram, men glir fritt i stripsingen!

Påse også at stoff reimen fra fotputen flyttes forover på seteplaten slik at den ikke blir for stram!

**NB!** Regulering av sittehøyden for stoler med Tilt-funksjon er nærmere beskrevet i servicemanualen.

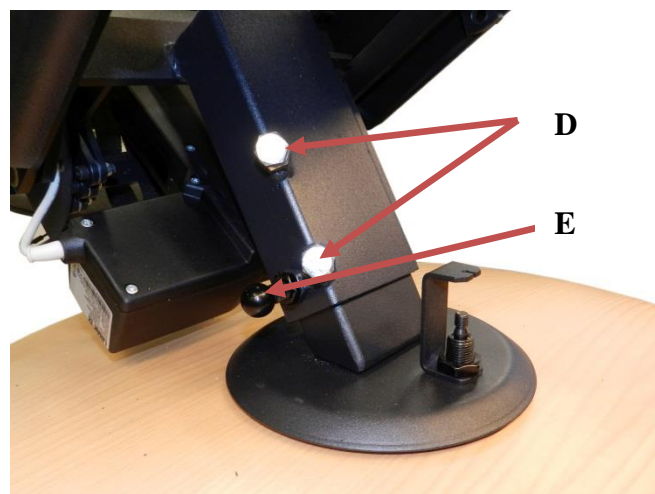


## Regulering av sittedybde

Seteputen er festet til seteplaten med borrelås (Velcro) og kan trinnløst reguleres i dybden: Ta løs puta og legg den tilbake der det passer best

Seteplaten er festet til seterammen med 2 bolter med vingemuttere. Seteplaten har 3 hull slik at den kan flyttes til 3 forskjellige plasseringer.

Som standard er platen festet i fremste hull. Platen kan da flyttes frem to hakk til.

Ved å kombinere plasseringen av seteplaten og seteputen finner man som regel en setedybde som passer

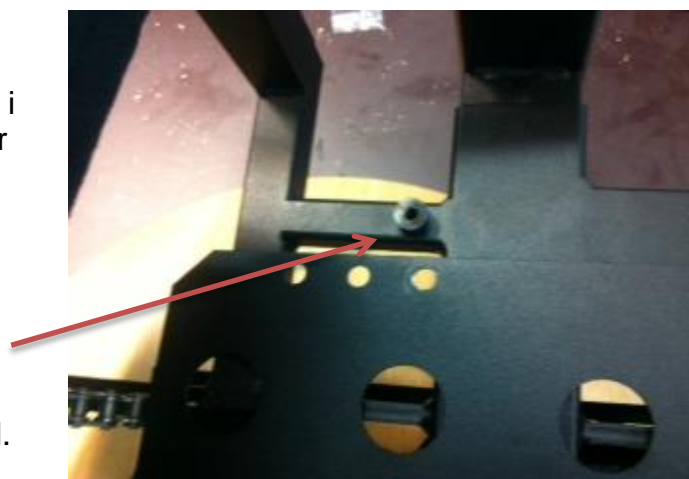

# Bruksanvisning


HEPRO  
-easy life

Stoler med oppreisningsfunksjon  
Arctic – Arctic Maxi – Arctic Mini

## Endre vinkel på setet

Ved å stramme på rattene under setet kan man endre vinkelen på setet. Det er et ratt på hver side.

Dersom seteplaten er flyttet fram må vingemutrene som holder denne nede løsnes litt. Når vinkelen er justert strammes vingemutrene slik at seteplaten sitter godt fast

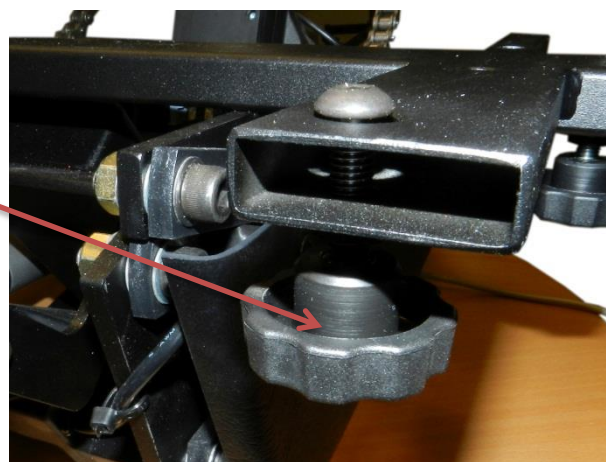

## Betjening av svinglås (for modeller med svingfunksjon)

For å kunne svinge stolen løftes spaken **K**. Når den slippes, låses stolen i nærmeste "låsehull".

Stolen kan svinge 180° og låse for hver 15°. Spaken leveres som standard på høyre side, men kan enkelt flyttes til venstre side.




Stoler med oppreisningsfunksjon  
Arctic – Arctic Maxi – Arctic Mini

## Regulering av ryggens øvre del – gjelder ikke Arctic Maxi og Mini

Ryggens øvre del kan brukes til å forlenge ryggen. Løft den opp, eller trykk den ned. Den låser trinnvis.

Øvre del av ryggen kan også vinkles. Bøy den fram eller tilbake til du finner posisjon som passer for deg

Dersom man ønsker en kortere rygg kan den øvre delen løftes helt av

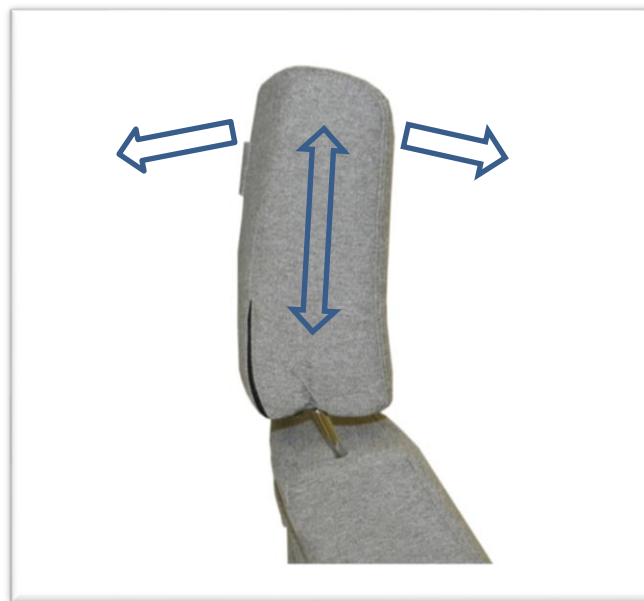

## Regulering nakkeputen


Nakkeputen er "løs" og henger gjennom en spalte bak på ryggen. Et lodd, som motvekt til puten, sørger for at den forblir i ønsket posisjon.

Dersom man velger å bruke kun nedre del av ryggen kan nakkeputen flyttes ned.

## Regulering av armlene

Armlenet kan høyde reguleres ved å løsne rattet **L** og flytt armlenet dit det passer best, Lås så med rattet

Dersom armlenet flyttes helt ned vil det flukte med setet og gjøre det mulig å komme seg inn i stolen fra siden.

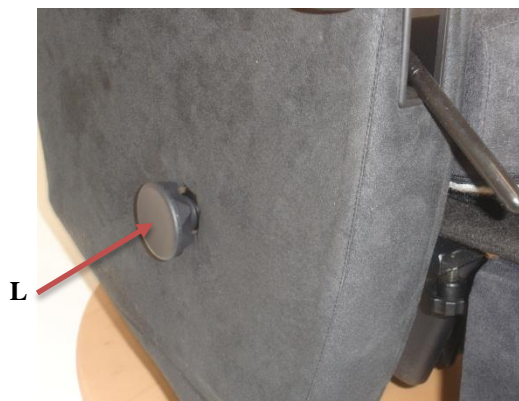

# Bruksanvisning


HEPRO  
-easy life

Stoler med oppreisningsfunksjon  
Arctic – Arctic Maxi – Arctic Mini

Armlenene kan flyttes ut 5 cm på hver side. Løsne skrallefestet og dra armlenet til ønsket posisjon og fest godt med skrallefestet. Dersom armlenene flyttes helt ut på begge sider, vil rygg og sete til vår Arctic Maxi stol passe.

## OBS!

Armlenene kan ikke flyttes dersom de er justert helt ned, det må i så fall løftes et par cm. Flytting av armlener er ikke mulig på Maxi og Mini

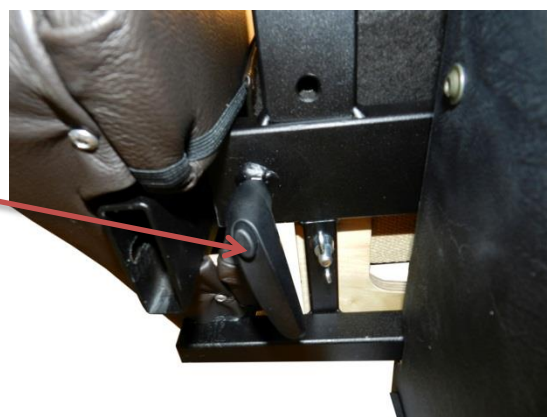

## Regulering av benstøtten

Benstøtten er festet til saksemekanismen med 2 glideskinner. Et strammebånd trekker puten inn i lengden når benstøtten kjøres inn. Benstøtten "vokser" i lengden ved utkjøring og går tilbake ved innkjøring. Hensikten er å få korrekt plassering av benstøtten i forhold til brukerens lengde.

Arctic Mini og Maxi har ikke "Voksende" benstøtte. Den må stilles inn slik at den passer.

Stoler med oppreisningsfunksjon  
Arctic – Arctic Maxi – Arctic Mini

## Betjening av håndkontroll Linak

Håndkontrollen henger i bøylene på utsiden av armlenet på høyre side som standard. Bøylen kan flyttes til venstre side.

Håndkontrollen virker slik:

- De to hvite styrer seteløftet.
- De to røde styrer benstøtten.
- De to gule styrer vinkelen på tiltet (Tilt modell).
- De to grønne styrer sete- og benstøtte samtidig (modeller med synkron bevegelse)



## Betjening av håndkontroll TiMOTION

Håndkontrollen henger i bøylene på utsiden av armlenet på høyre side som standard. Bøylen kan flyttes til venstre side.

Håndkontrollen virker slik:

- De to hvite styrer seteløftet.
- De to røde styrer benstøtten.
- De to gule styrer vinkelen på tiltet (Tilt modell).
- De to hvite styrer sete- og benstøtte samtidig (modeller med synkron bevegelse)



For stoler med Tilt



For Synkron  
stoler



For Std. stoler

## Tilt av sitteenheten (for modeller med tilt funksjon)

Denne funksjonen gjør at hele sitteenheten kan tiltes uavhengig av vinkelen mellom sete og rygg. Den kan bare aktiveres når setet er i laveste posisjon.

## Rengjøring

Trekk av stoff kan vaskes i maskin med temperatur opp til 60 °C. Trekket må ikke tørkes i tørketrommel! Etter at trekket har tørket, kan det strykes forsiktig. Møbelrens kan benyttes på flekker. Øvrige deler tørkes rene for støv

Trekk av hud støvtørkes forsiktig ved hjelp av mildt såpevann og fuktet (ikke våt) klut eller svamp. Hudtrekkene bør behandles en gang i året med nøytral lærbehandlingskrem.

Stoler med oppreisningsfunksjon  
Arctic – Arctic Maxi – Arctic Mini

## Garanti

Ved normalt bruk i samsvar med bruksanvisningen yter HEPRO 2-års garanti mot material- og produksjonsfeil. Ved reklamasjoner eller henvendelser om produktet må produktets serienummer alltid oppgis som referanse.



## SIKKERHET

Stolen er et hjelpemiddel og skal ikke anvendes som “leketøy” for barn.

Overbelastning kan føre til skade både på bruker og produkt.

Om du merker at stolen ikke fungerer som beskrevet eller du er vant til, kontakt Hjelpemiddelsentralen umiddelbart for kontroll.



## ADVARSEL

- Ikke la din egen tyngde komme fremover på, eller la andre personer sitte på fotputen mens den er oppe. Stolen kan da velte!
- Selv om polstringen er motstandsdyktig mot antennelse, så må det vises forsiktighet ved bruk av åpen flamme nær produktet, for eksempel ved røyking.
- Kontroller alltid at ingen personer eller kjæledyr er under stolen før elektriske funksjoner kjøres. Løftemekanismen kan da utgjøre klemfare.