

Hvordan ta med seg S19V på fly?

Flyfrakt, spesifikasjon av batterier

Li-ion batterier kan være vanskelig å få ta med på fly.

Etter "IATA (International Air Transport Association) DGR

60th edition" gjelder for elektriske rullestoler med fastmonterte batterier at det ikke er begrensninger for maksimalt tillatt batterikapasitet på Li-ion batterier.

Batteriene har nødvendig UN38-3 godkjenning og rullestolen kan derfor bringes om bord i fly fra selskaper som er medlem av IATA. Dette må likevel avklares med flyselskapet i hvert enkelt tilfelle. Batteriene skal normalt stå i scooteren når den sendes med fly.

Batteriene skal være tappet til 30%. Det vil si at batteriindikatoren skal være på rødt felt. Dette gjelder for begge batterier. Hovedsikringen skal tas ut av batterikassen under flyfrakt.

Flyselskaper som ikke er tilknyttet IATA kan ha andre bestemmelser.

OBS!

Hvis S19V skal være med på flyet, så må dette opplyses når du kjøper billett. Selv om dette er klarert på forhånd er det til syvende og sist kapteinen på flyet som bestemmer. Han eller hun kan beslutte at rullestolen eller batteriet ikke får bringes om bord.